



Mobiele handleiding

Versie: 18 september 2020





Reduceer mobiele app

Met de mobiele app Reducept kunt u Reducept spelen zonder de VR headset. In deze handleiding installeert u Reducept op uw smartphone en koppelt u uw spel aan het abonnement dat u van uw behandelaar heeft ontvangen.


Inhoud

Het installeren van Reducept op uw telefoon	3
Inloggen op de Reducept-app	5
Speel het spel Reducept in VR	6




Het installeren van Reducept op uw telefoon

1. Open de iTunes Store (op iPhone) of de Google Play store (op Android-telefoons).

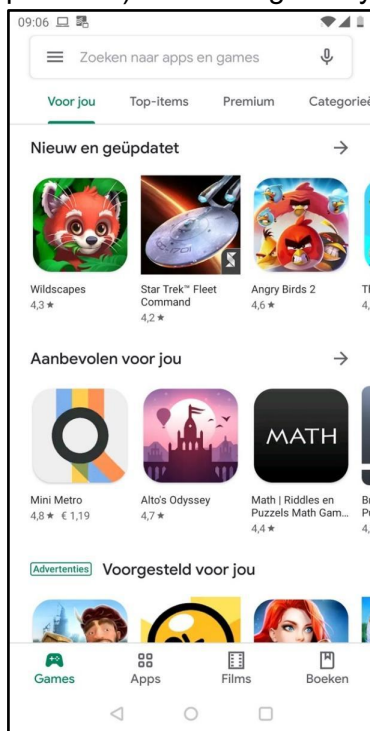


2. Zoek in het zoekveld naar 'reducept'. Kies in de zoekresultaten de Reducept-applicatie.

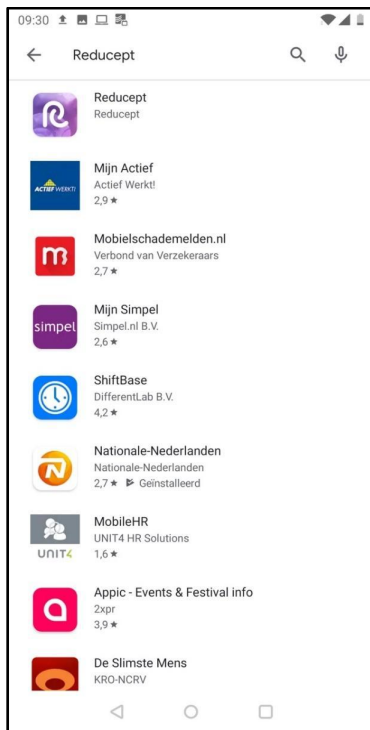



3. Druk op 'Installeren'.

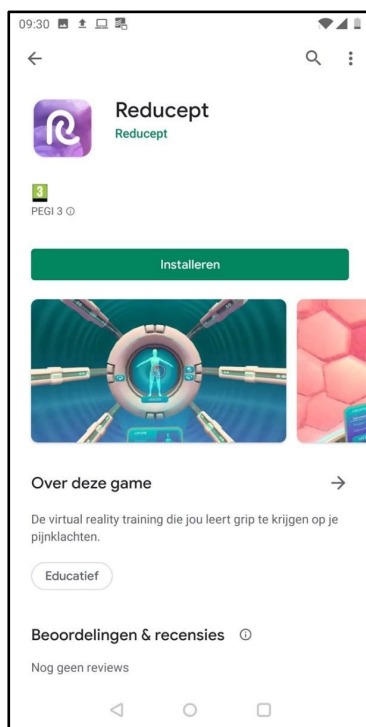


4. Druk op 'Open'. De Reducept-app is ook toegevoegd aan het startscherm van uw telefoon.






Inloggen op de Reducept-app

1. Start de Reducept-app (zie de stap 'Reducept op uw telefoon installeren').
2. Na het volgen van de introductie klikt u op 'Log in'

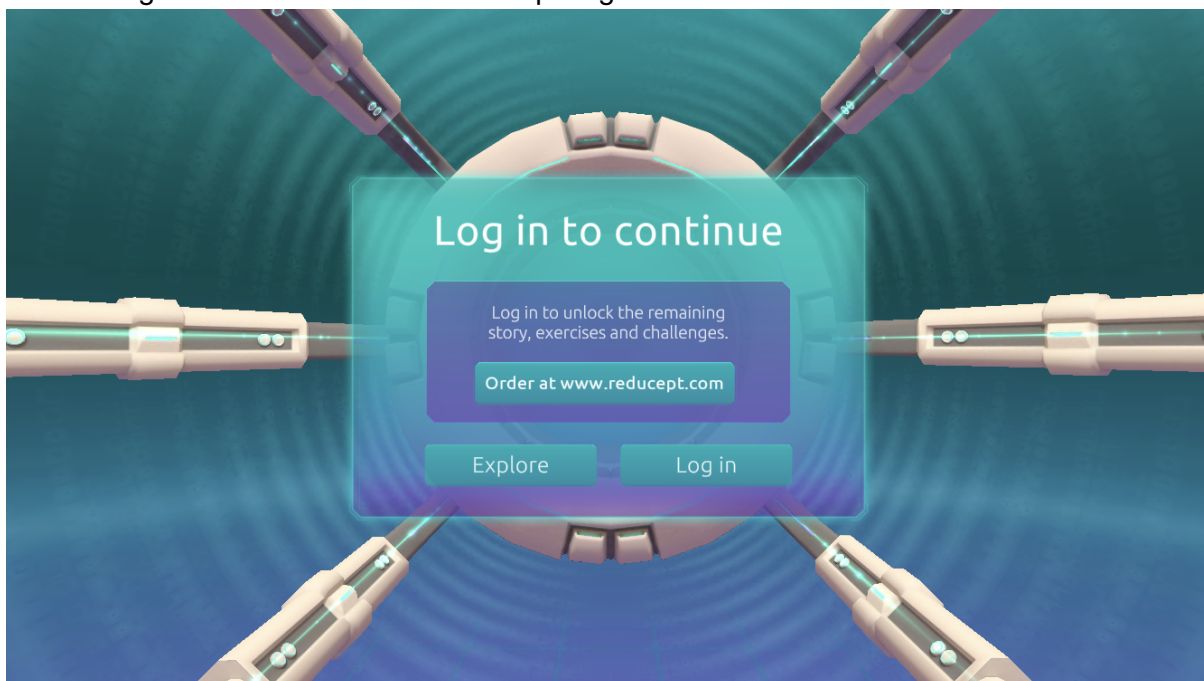

3. Voer uw e-mailadres en het door u ingestelde wachtwoord in het Reducept-dashboard in en druk vervolgens op de knop 'Login'.

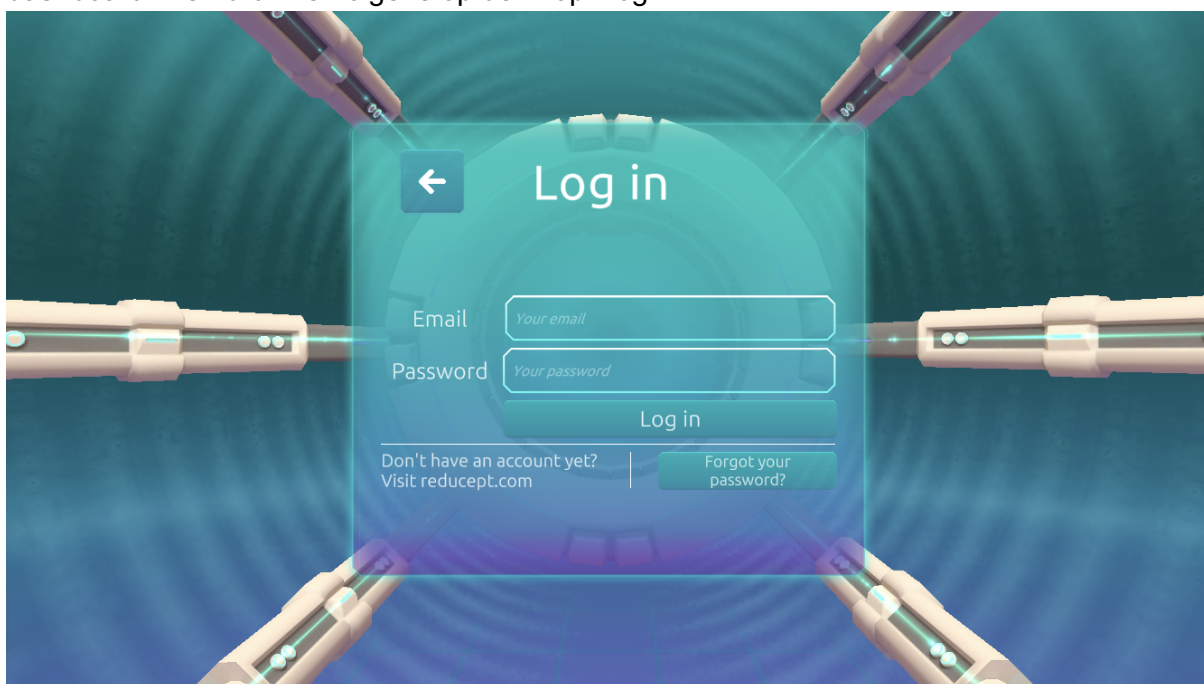


4. Je bent nu ingelogd.




Speel het spel Reducept in VR

1. Start de Reducept-app (zie de stap 'Reducept op uw telefoon installeren'). Zorg ervoor dat u bent ingelogd (zie de stap 'Aanmelden bij de Reducept-app').
2. Open het scherm 'Opties' door op het tandwiel in de rechterbovenhoek te drukken.

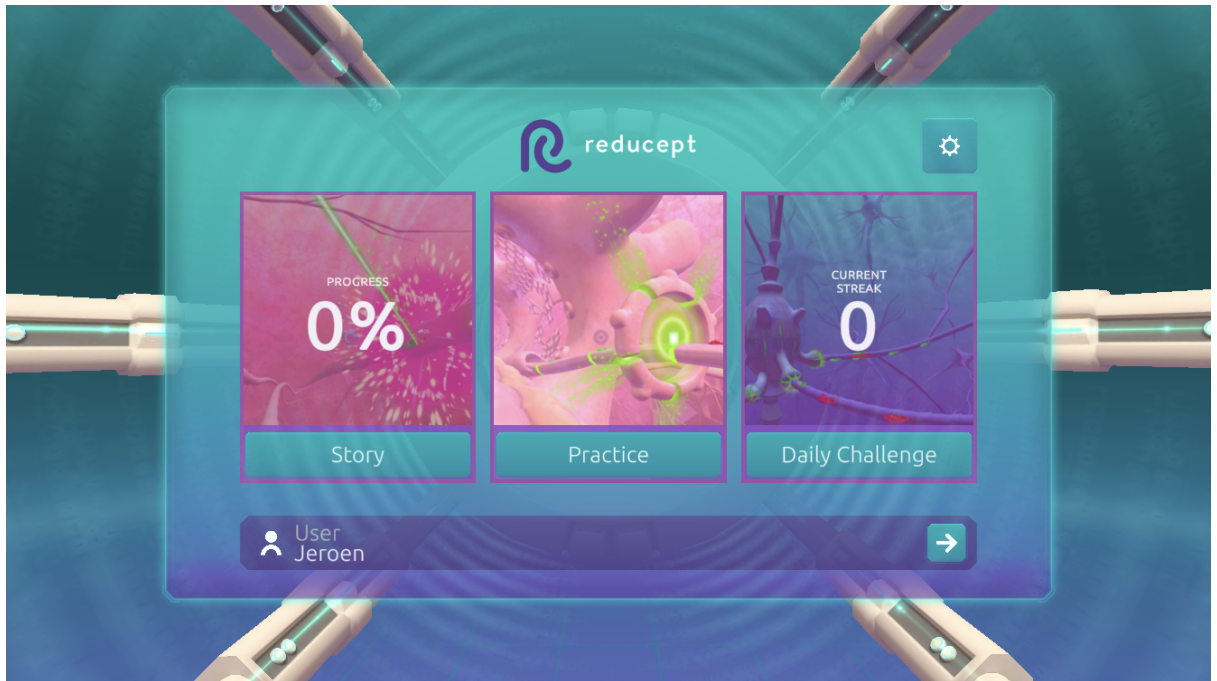

3. In VR Spelen? Druk in het scherm 'Opties' op de knop 'Schakel VR'.

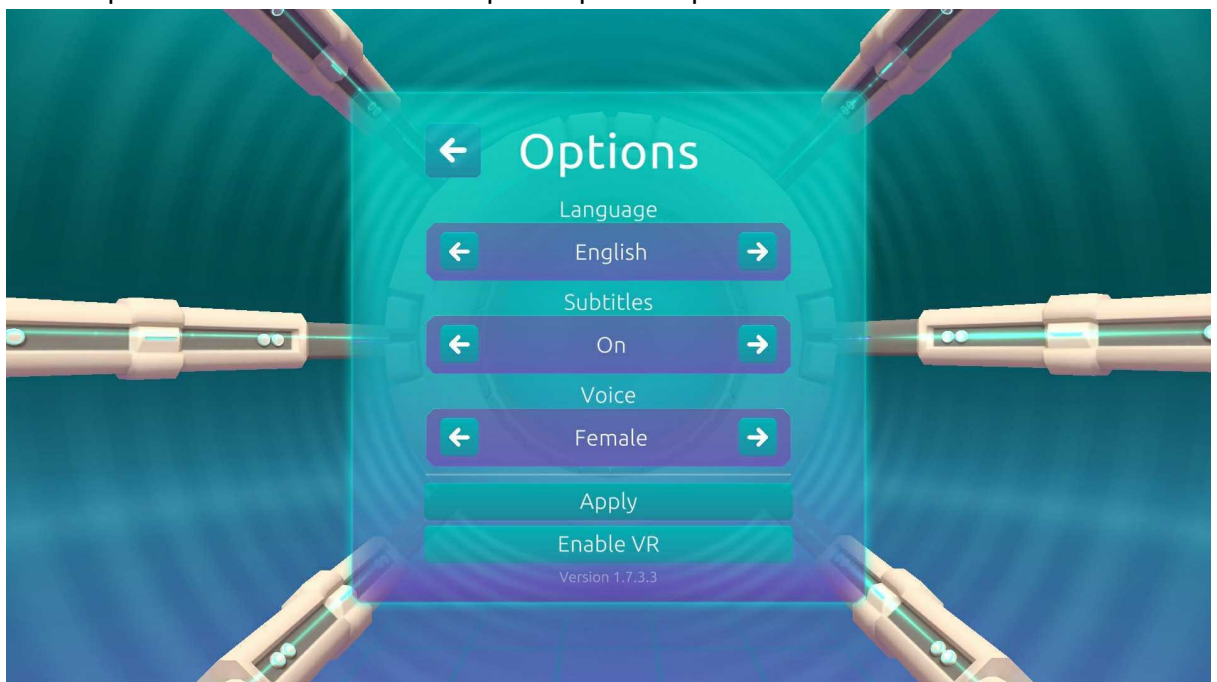



4. **(OPTIONEEL)** Plaats uw telefoon in een speciale VR-headset en plaats de headset op uw hoofd. U kunt Reducept ook zonder VR headset spelen.

